

Cinta Autoclave Vapor Libre de Plomo

Control Químico Externo

Clase 1 Indicador de Proceso



Ficha Técnica

Descripción

Control de exposición: Uso de indicadores químicos externos para distinguir paquetes procesados, de los no procesados.

Cinta indicadora para esterilización a vapor libre de plomo.

Proporciona la identificación inmediata de los artículos procesados.

Las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización de 121°C, y a un proceso de esterilización a vapor de mayor temperatura (136°C).

Es considerado no estéril cuando la tonalidad no alcance los parámetros descritos.

El confiable indicador químico reacciona cuando se expone al proceso de esterilización a vapor.

Se adhiere a envolturas de tela, tela tratada, material no tejido, papel y plástico.

El adhesivo sella los paquetes de manera segura, y es fácil de remover.

El soporte se estira para minimizar el desprendimiento de la cinta durante la esterilización del paquete.

Se puede escribir en su superficie, o rotular con etiquetas preimpresas como por ejemplo las etiquetas para cargas de esterilización 3M Comply.

Usos

Sirve como cinta de cierre para sellar los paquetes que se van a esterilizar.

Frecuencia: Cada paquete.

¿Por qué es necesario? Para prevenir el uso de paquetes no procesados.

Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Condiciones de Almacenaje	Vida Útil	Empaque
1322-12MM	Cinta para Autoclave Libre de Plomo	12 mm x 55 mts	15°C- 30°C 35% a 50% HR	18 meses	42 rollos/caja
1322-18MM	Cinta para Autoclave Libre de Plomo	18 mm x 55 mts	15°C- 30°C 35% a 50% HR	18 meses	28 rollos/caja