



# Micropore™

## Adhesivo gentil a la piel

### Descripción

Micropore™ es una cinta hipoalergénica que se adapta fácilmente a la superficie aplicada. Está diseñada para aplicaciones de larga duración (3 días o más) y sobre pieles delicadas.

### Uso

- Fijación de apósitos y dispositivos en general
- Ideal en caso de aplicaciones prolongadas o a repetición sobre la misma zona
- Sujeción de apósitos faciales, postquirúrgicos, para asegurar bolsas de ostomías
- Para ser aplicada en zonas sensibles y pieles delicadas, especialmente la de niños y adultos mayores

### Características Físicas y Químicas

Micropore™ está elaborado con un respaldo de rayón (papel), no tejido y adhesivo tipo acrilato.

### Ventajas y Beneficios de Uso

- Hipoalergénica, lo que reduce el riesgo de reacciones alérgicas en los pacientes.
- Semi-oclusiva y porosa, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno y vapor a la piel evitando la maceración de la misma
- Excelente adhesión a piel húmeda, beneficio muy importante para pacientes que presentan sudoración o en presencia de humedad ambiental elevada.
- Puede ser utilizada por largos periodos de tiempo
- Conformable, se adapta fácilmente a las superficies donde es aplicada
- Gentil a la piel, suave
- Buena adhesión, baja adhesión inicial que aumenta en el tiempo
- Disponible en color blanco y piel (en algunas medidas)
- Libre de látex

### Tiempo de vida en el anaquel

La fecha de caducidad se imprime en cada caja de Micropore™. Los símbolos de Lote y el reloj de arena que aparecen en la caja, representan el número de lote y la fecha de caducidad.

### Recomendaciones - Advertencias

- Para un mejor desempeño, almacenar el producto entre 15°C - 30°C y una humedad relativa de un 35% - 60%.
- La piel debe estar limpia y seca antes de la aplicación de una cinta
- Nunca aplique la cinta comenzando desde un extremo y tirándola hacia el lado contrario
- Aplique la cinta desde el centro hacia afuera, en ambas direcciones
- No aplique la cinta directamente del rollo, corte el trozo que va a usar y aplique



# Micropore™

## Adhesivo gentil a la piel



### Presentación

Número de Catálogo	Descripción	Cantidad
1530-0	Color Blanco 1/2" x 10 yds / 1,25cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 24 rollos
1530-1	Color Blanco 1" x 10 yds / 2,5cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 12 rollos
1530-2	Color Blanco 2" x 10 yds / 5cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 6 rollos
1530-3	Color Blanco 3" x 10 yds / 7,5cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 4 rollos
1533-0	Color Piel 1/2" x 10 yds / 1,25cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 24 rollos
1533-1	Color Piel 1" x 10 yds / 2,5cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 12 rollos



### División Hospitales

#### 3M Guatemala

Calzada Roosevelt,  
12-33, Zona 3 Mixco  
Ciudad de Guatemala  
Teléfono (502) 2379-3636

#### 3M Honduras

San Pedro Sula  
Blvd. del Norte, Col. Colvisula Cortes,  
Honduras  
Teléfono (504) 2551-8777

#### 3M El Salvador

Calle Chaparrastique #11  
Urb. Ind. Sta. Elena,  
La Libertad, El Salvador.  
Teléfono (503) 2210-0888

#### 3M Nicaragua

Km 8 Carretera Sur.  
Managua, Nicaragua  
Teléfono (505) 2265-2567

#### 3M Costa Rica

1Km Este del cruce La Valencia.  
San José, Costa Rica.  
Teléfono (506) 2277-1000

#### 3M Panamá

Av. Ricardo J. Alfaro.  
Apartado 0816-00705.  
Panamá, RP.  
Teléfono (507) 302-8100

#### 3M República Dominicana

Ave. Gregorio Luperon,  
Zona Industrial de Herrera  
Santo Domingo, República Dominicana  
Teléfono (809) 530-6560