



# 3M™ Durapore™

## Cinta de tela tipo Seda

### Descripción de Producto

Durapore™ es una cinta hipoalérgica, con respaldo tejido de tafetán y adhesivo de acrilato; permite realizar fáciles cortes bidireccionales y está diseñada para aplicaciones de larga duración que requieran resistencia.

### Uso

Durapore™ está indicada para ser utilizada en la fijación de:

- Apósitos generales y voluminosos
- Dispositivos de uso médico
- Tubos endotraqueales / nasogástricos
- Inmovilizaciones u otras situaciones clínicas que desafíen la resistencia y adherencia de la cinta
- Posicionamiento del paciente en cama quirúrgica
- Estabilización de férulas digitales y tablillas de brazo

### Características Físicas y Químicas

Durapore™ está elaborado con un respaldo tejido de tafetán (género tipo seda) y adhesivo tipo acrilato.

### Ventajas y Beneficios de Uso

- Buena adhesión inicial, muy resistente y fuerte.
- Porosa
- Versátil
- Conformable
- Fácil de rasgar en ambos sentidos
- Hipoalérgica y libre de látex

### Recomendaciones – Advertencias

- Para un mejor desempeño, almacenar el producto entre 15°C - 30°C y una humedad relativa de un 35% - 60%.
- La piel debe estar limpia y seca antes de la aplicación de una cinta
- Nunca aplique la cinta comenzando desde un extremo y tirándola hacia el lado contrario
- Aplique la cinta desde el centro hacia afuera, en ambas direcciones
- No aplique la cinta directamente del rollo, corte el trozo que va a usar y aplique





# 3M™ Durapore™

## Cinta de tela tipo Seda

### Presentación del Producto

Numero de Catálogo	Descripción	Cantidad
1538-0	Color Blanco 1/2" x 10 yds	Caja / 10 Cajitas / 24 rollos
1538-1	Color Blanco 1" x 10 yds	Caja / 10 Cajitas / 12 rollos
1538-2	Color Blanco 2" x 10 yds	Caja / 10 Cajitas / 6 rollos
1538-3	Color Blanco 3" x 10 yds	Caja / 10 Cajitas / 4 rollos



### División Hospitalares

#### 3M Guatemala

Calzada Roosevelt,  
12-33, Zona 3 Mixco  
Ciudad de Guatemala  
Teléfono (502) 2379-3636

#### 3M Honduras

San Pedro Sula  
Blvd. del Norte, Col. Colvisula  
Cortés, Honduras  
Teléfono (504) 2551-8777

#### 3M El Salvador

Calle Chaparrastique #11  
Urb. Ind. Sta. Elena.  
La Libertad, El Salvador.  
Teléfono (503) 2210-0888

#### 3M Nicaragua

Km 8 Carretera Sur.  
Managua, Nicaragua  
Teléfono (505) 2265-2567

#### 3M Costa Rica

1Km Este del cruce La Valencia.  
San José, Costa Rica.  
Teléfono (506) 2277-1000

#### 3M Panamá

Av. Ricardo J. Alfaro.  
Apartado 0816-00705.  
Panamá, RP.  
Teléfono (507) 302-8100