

# Steri-Strip™



## Suturas cutáneas adhesivas reforzadas


### Descripción

Las suturas cutáneas Steri-Strip™ están hechas de un material estéril, no tejido, poroso y precortado. Estas suturas están reforzadas por filamentos los cuales proporcionan una alta resistencia y están recubiertas con un adhesivo hipoalergénico.

### Uso

Steri-Strip™ están indicadas para:

- El cierre de la piel en el tratamiento de laceraciones e incisiones quirúrgicas.
- Cierre primario de heridas limpias o heridas limpias-contaminadas
- Puede usarse junto con suturas convencionales y grapas para la piel o después de la retirada como soporte de la herida

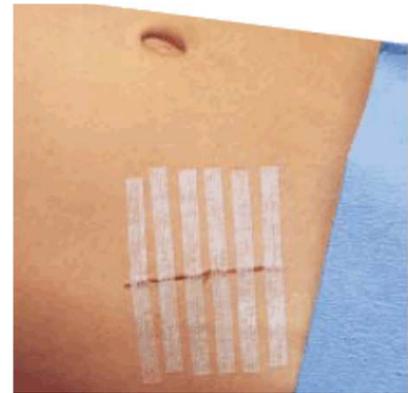

### Características Físicas y Químicas

Material estéril, microporoso y no tejido de rayón, con filamentos elásticos de nylon, recubierto de un adhesivo de acrilato hipoalergénico.

### Ventajas y Beneficios de Uso

- Proporciona soporte a la herida y aumenta la fuerza de resistencia a la tensión de la herida comparada con las suturas
- Su diseño no invasivo reduce la formación de una cicatriz y el riesgo de infección al compararlo con las suturas y grapas; minimizando el traumatismo del tejido y proporcionando mejores resultados cosméticos
- Material de rayón con filamentos elásticos para una mayor resistencia a la tensión
- Adhesivo hipoalergénico y libre de látex
- Permite el retiro anticipado de grapas/suturas
- Menos costosas que los adhesivos cutáneos, suturas o grapas
- Estéril, permite el intercambio gaseoso de la piel y es cómoda de usar

### Tiempo de Vida

La fecha de caducidad se imprime en cada envoltorio Steri-Strip™. Los símbolos de Lote y el reloj de arena que aparecen en el envoltorio, representan el número de lote y la fecha de caducidad.

### Recomendaciones – Advertencias

- Las suturas cutáneas Steri-Strip™ están contraindicadas cuando no se pueda obtener una buena adhesión, como por ejemplo en presencia de exudado, piel grasienta o exceso de vello.
- Están contraindicadas en heridas infectadas.
- Están contraindicadas para usarse en las heridas donde la tensión de la piel sea excesiva o en las que no tenga fácil acceso a la aproximación con los dedos o con las pinzas.
- La piel debe estar limpia, seca y sin grasa para asegurar que haya una buena adhesión.
- No aplique las suturas adhesivas con tensión. Si se aplica con tensión excesiva puede dar como resultado dehiscencia, formación de ampollas en la piel o pérdida de la adhesión

## Presentación

Número de Catálogo	Tamaño	Suturas / Sobres	Sobres / Estuche	Estuches / Caja
R1540	1/8 pulg. x 3 pulg. / 3mm x 75mm	5	50	4
R1541	1/4 pulg. x 3 pulg. / 6mm x 75mm	3	50	4
R1542	1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. / 6mm x 38mm	6	50	4
R1546	1/4 pulg. x 4 pulg. / 6mm x 100mm	10	50	4
R1547	1/2 pulg. x 4 pulg. / 12mm x 100mm	6	50	4
R1548	1 pulg. x 5 pulg. / 25mm x 125mm	4	25	4
R1549	1/2 pulg. x 2 pulg. / 12mm x 50mm	6	50	4

## División Hospitales

### 3M Guatemala

Calzada Roosevelt,  
12-33, Zona 3 Mixco  
Ciudad de Guatemala  
Teléfono (502) 2379-3636

### 3M Honduras

San Pedro Sula  
Blvd. del Norte, Col. Colvisula Cortes,  
Honduras  
Teléfono (504) 2551-8777

### 3M El Salvador

Calle Chaparrastique #11  
Urb. Ind. Sta. Elena,  
La Libertad, El Salvador.  
Teléfono (503) 2210-0888

### 3M Nicaragua

Km 8 Carretera Sur.  
Managua, Nicaragua  
Teléfono (505) 2265-2567

### 3M Costa Rica

1Km Este del cruce La Valencia.  
San José, Costa Rica.  
Teléfono (506) 2277-1000

### 3M Panamá

Business Park V, Nivel 10,  
Costa del Este, Panamá, RP.  
Teléfono (507) 302-8100

### 3M República Dominicana

Ave. Gregorio Luperon,  
Zona Industrial de Herrera  
Santo Domingo, República Dominicana  
Teléfono (809) 530-6560